



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

GRILLO chair





Una sedia per mille attività.

Grillo Chair è una **sedia ergonomica** e **regolabile** indicata per bambini con disabilità che necessitano di un supporto durante lo svolgimento di attività ricreative, didattiche e della vita quotidiana.

È una **seduta dal design ergonomico** studiata per garantire **massimo comfort** al bambino che, migliorando la postura seduta, è incentivato a sviluppare le capacità motorie e di coordinazione oculo manuale, l'attenzione e quindi l'inclusione sociale.

La **tapppezzeria portante, estremamente traspirante e resistente**, permette al bambino di vivere un'**esperienza di seduta gratificante** e libera da fastidi. Disponibile nei colori rosa e blu.

Grazie ad un'ampia gamma di componenti posturali **Grillo Chair è facilmente adattabile**, riuscendo a soddisfare le esigenze di ogni bambino. In classe e a casa **il bambino si sentirà al sicuro** e ciò lo aiuterà nelle varie attività e nel rapporto con i suoi pari.

PRODOTTO
MARCATO 

GRILLO CHAIR è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745



Abbinamento perfetto

Stabilità, postura e praticità



Grillo Chair ha una struttura compatta di alluminio, verniciata con polveri epossidiche atossiche.

Il **sistema di regolazione in altezza** tramite molle a gas consente di modificare l'altezza della sedia anche con il bambino seduto.

Il **sistema di sicurezza** impedisce l'azionamento involontario.

Grillo Chair è la soluzione ideale per la scuola e per la casa: può essere abbinata a qualsiasi superficie per attività didattiche e ludiche o a tavoli polifunzionali come il **Tavolo Multifunzione di Ormesa**, creando un **match perfetto** tra stabilità, postura e praticità.

Tappezzeria smart

Rivestimento all'avanguardia

La tappezzeria di Grillo Chair ha una struttura all'avanguardia a **nido d'ape**, quindi **estremamente traspirante a contatto con la pelle**. La struttura del tessuto crea una "camera d'aria" che consente sia la **circolazione dell'aria per una massima traspirazione**, sia un **isolamento termico naturale** efficace.

Il doppio strato è garanzia di:

- › **Igiene:** grazie all'eccellente traspirabilità, riduce la sudorazione e la formazione dei batteri.
- › **Lavaggio:** la composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio, nonostante non sia estraibile.
- › **Asciugatura rapida.**
- › **Resistenza:** Alta resistenza all'abrasione. La trama ad elevata resistenza mantiene la performance anche a carichi elevati (test ISO 12947).
- › **Ignifugicità** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.



Caratteristiche tecniche e regolazioni






Schienale

Reclinabile in maniera semplice e sicura con le due levette verdi. Regolabile in altezza a scorrimento in modo semplice, senza il rischio di perdere la vite.



Seduta

Ergonomica e leggermente basculata per impedire lo scivolamento del bacino e garantire maggior comfort. Regolabile in profondità a scorrimento in maniera continua e precisa. Regolabile in larghezza tramite componente opzionale 958R pelotte al bacino multiregolabili.

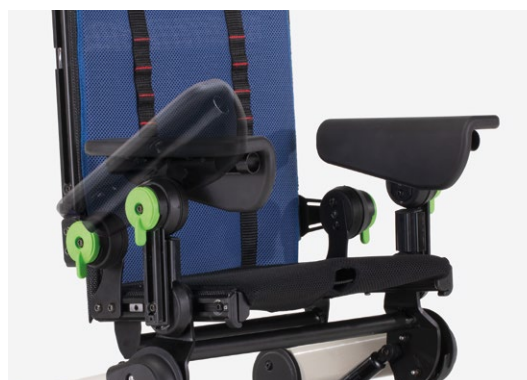

Braccioli


morbidi, regolabili in altezza ed inclinazione.

Componenti




947 Cintura pelvica ad angolo variabile

Disponibile in tre misure.

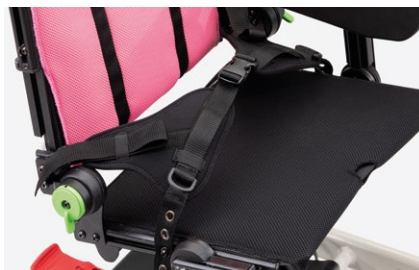


920 Cintura pelvica a quattro punti

Disponibile in due misure.

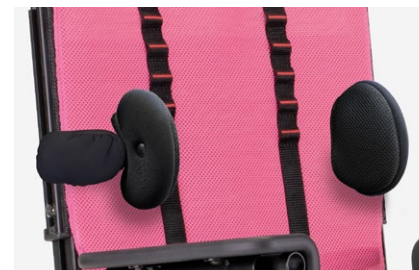


838 Pelotte toracali

regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. Disponibili in due misure.

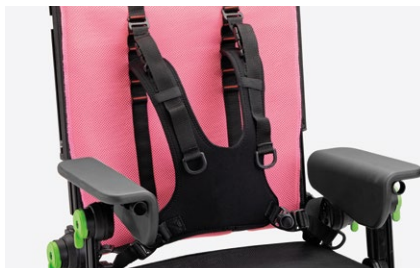


853 Pettorina a bretellaggio

Disponibile in due misure.

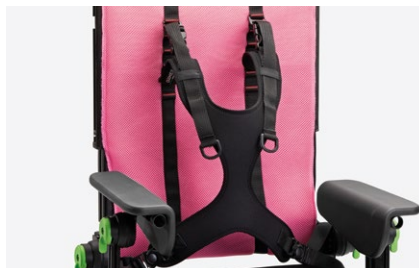

853 slim Pettorina sagomata a quattro punti

Solo per sedia misura Medium.

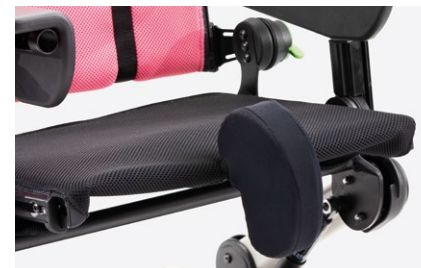

834N Divaricatore imbottito

Disponibile in due misure.

Componenti



958R Pelotte al bacino multiregolabili


Regolabili in larghezza, rotazione e profondità.



824 Tavolo con incavo avvolgente

Regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.

Costruito con materiale resistente e igienico, design senza spigoli che non intrappola residui di cibo.

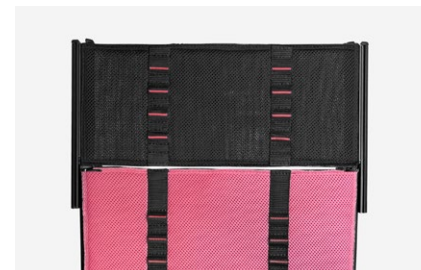

823 Prolunga schienale

Per il supporto del capo.



835 Poggiatesta sagomato

con contenimento laterale ed occipitale, regolabile in altezza. In combinazione solo con la prolunga schienale 823.



865 Poggiatesta imbottito

regolabile in altezza. In combinazione solo con la prolunga schienale 823.



959 Set di 4 ruote con freno.

In alternativa ai 4 piedini neri di appoggio. Ruote piroettanti da 75 mm dotate tutte di freno di stazionamento.

Fornite con pedana appoggiapiedi.

Per un facile trasporto e stoccaggio. Consente il trasferimento anche con il bambino seduto.


861 Set di 4

In alternativa ai 4 piedini neri di appoggio. Ruote piroettanti da 75 mm dotate tutte di freno di stazionamento.

Per un facile trasporto e stoccaggio.

Grillo Chair

misure e pesi

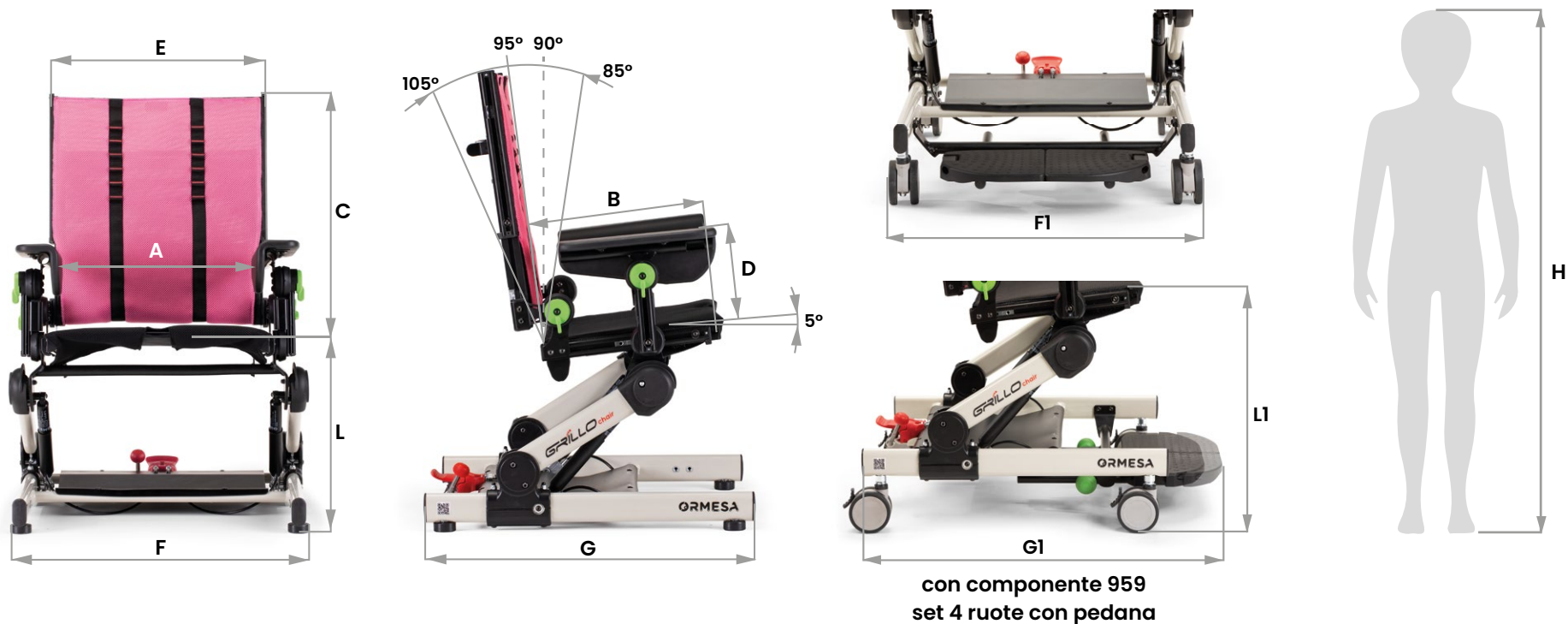


	A*	B	C	D	E	F	F1	G	G1	L	L1	H	Peso Ausilio	Portata Massima
Small	30 cm	20-30 cm	30-45 cm	15-18 cm	36 cm	48 cm	50,5 cm	50 cm	52-64 cm	20-31 cm	28-39 cm	90-120 cm	10,7 kg	35 kg
Medium	35 cm	28-43 cm	35-55 cm	16-20 cm	41 cm	52 cm	54,5 cm	56,5 cm	62-73 cm	25-40 cm	33-48 cm	110-145 cm	13 kg	45 kg

* Con componente 958R pelotte al bacino multiregolabili: misura SMALL 20-30 cm; misura MEDIUM 25-35 cm

Si ringrazia la Scuola dell'Infanzia di Sterpete per la collaborazione e l'ospitalità.



Giulio e la sua storia vi aspettano nel sito ufficiale di Ormesa, assieme agli altri protagonisti della nostra fantastica community globale.

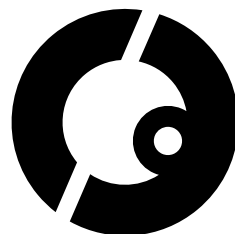

**Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.
È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo
l'energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.**

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

